



# Geef uw patiënten meer redenen om stralend te glimlachen

Opalescence  
 go™  
Tooth Whitening

Een stralende, witte glimlach kan uw patiënten meer zelfvertrouwen geven om vaker te lachen. Met een Opalescence Go-bleekbehandeling kunnen patiënten hun gebit bleken waar en wanneer ze maar willen. Zo makkelijk dat je er vanzelf van gaat stralen.

# Sterke, professionele bleekbehandeling, "to go"



## Instructies


Lees voor gebruik van een product altijd de meegeleverde aanwijzingen en waarschuwingen.



Haal het product uit de verpakking. "U" – bleeklepel voor de bovenkaak "L" – bleeklepel voor de onderkaak



Plaats de lepel voor de bovenkaak op het gebit.

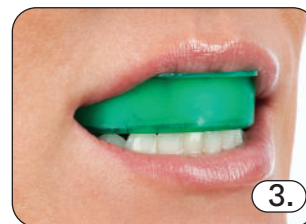

Bijt stevig dicht en zuig 2 seconden aan de lepel.



Verwijder de gekleurde buitenste lepel en laat de witte binnenste lepel op het gebit zitten. Herhaal deze stap voor de lepel voor de onderkaak.



Draag de lepels gedurende de tijd die is aangegeven, verwijder daarna de lepels en poets uw tanden.

- Het unieke lepelmateriaal heeft een opvallend comfortabele pasvorm en past zich goed aan de individuele glimlach van iedere patiënt aan.
- Door de afdekking van molaar tot molaar komt de gel in aanraking met meer posterioelementen.
- Doordat de UltraFit-lepel zich uitstekend aanpast, blijft een maximale hoeveelheid gel tijdens de bleekbehandeling in aanraking komen met het gebit.
- Verkrijgbaar met 6% waterstofperoxide (draagtijd 60 tot 90 minuten).

IN DE KOELKAST BEWAREN

### Opalescence Go Patient Kits



Smaak	6%
mint	4634
meloen	3592

Iedere set omvat 10 blisterverpakkingen met 1 bovenkaak- en 1 onderkaaklepel  
 1 x 20 ml (28 g) Opalescence Whitening Toothpaste

IN DE KOELKAST BEWAREN

### Opalescence Go Mini Kits



Smaak	6%
mint	4644
meloen	3599

Iedere set omvat 4 blisterverpakkingen met 1 bovenkaak- en 1 onderkaaklepel

Volg ons!



nl.ultradent.blog

UPP 298-NL 03-2026

© 2026 Ultradent Products, Inc. All rights reserved.

ULTRADENTPRODUCTS.NL

