

Een veilig gevoel – Systeemhygiëne van Dürr Dental

4 kleuren, 4 toepassingen – effectief, logisch, veilig



 **DÜRR
DENTAL**

THE BEST, BY DESIGN

Zuiginstallatie-hygiëne
en specifieke
toepassingen

08



FD oppervlakte-hygiëne

14



HD handhygiëne

22



ID instrumentenhygiëne

26



Service en contact

30



04

4 kleuren, 4 toepassingen

06

Systeemhygiëne van Dürr Dental

08

Zuiginstallatie-hygiëne en specifieke toepassingen

14

FD oppervlakte-hygiëne

22

HD handhygiëne

26

ID instrumentenhygiëne

30

Service en contact

WE LIKE IT!



4 kleuren, 4 toepassingen

Infectiebescherming is het hoogste gebod in tandartspraktijken. Een naadloze praktijkhygiëne omvat de systematische instrumentenbehandeling, een zeer accurate handen- en oppervlaktedesinfectie en een volledige reiniging en desinfectie van de zuiginstallatie in de praktijk. Teineinde gebruikers meer veiligheid te bieden bij de verschillende preparaten, zijn de producten van Dürr Dental gekenmerkt volgens een speciaal vierkleurensysteem. Alle preparaten worden in dit systeem duidelijk en overzichtelijk toegewezen aan hun toepassingsgebied:



Zuiginstallaties en specifieke toepassingen

De gele productlijn omvat een breed spectrum aan toepassingsgebieden. Zo zorgen onder andere Orotol plus en MD 555 cleaner in combinatie met elkaar voor een zeer efficiënte reiniging en desinfectie van zuiginstallaties. Maar ook voor afdrukken en tandtechnische werkzaamheden levert Dürr Dental de passende hygiëneproducten.



Oppervlakken

De groene productlijn overtuigt met uitermate effectieve en gebruikersvriendelijke reinigings- en desinfectiemiddelen voor oppervlakken van de medische inventaris. Concentraten, gebruikoplossingen en een uitgebreid assortiment doekjes vergemakkelijken de dagelijkse hygiënische maatregelen voor het praktijkteam.



Handen

De roze productlijn biedt een zachte en betrouwbare bescherming. Een zorgvuldig reiniging en desinfectie van de handen is van essentieel belang. Ziektes worden namelijk het meest frequent overgedragen via de handen. De Hd-preparaten zijn dermatologisch getest en zorgen voor een balans tussen effectieve en behoedzame hygiëne.



Instrumenten

De blauwe productlijn staat garant voor een veilige, behoedzame, handmatige reiniging en desinfectie van instrumenten. Extra apparaten en toebehoren ronden het systeem rondom het hygiëncircuit af.



FD 322 of FD 333
Sneldesinfectie



FD 350
Sneldesinfectie

FD 333
top wipes

Onze aanbeveling voor uw praktijk

HD 420 plus
handendesinfectie

HD 435
waslotion



FD 366 sensitive
Desinfectie van
gevoelige
oppervlakken

FD 360
reiniging en
verzorging
van kunstleer



FD 366 sensitive wipes
of sensitive top wipes



MD 555 cleaner
speciale reiniger
voor zuiginstallaties

Orotol plus
desinfectie van
zuiginstallaties



MD 550
reinigingsmiddel voor de spittooschaal



ID 220
borendesinfectie



ID 212 of ID 213
instrumentendesinfectie



Het beste als systeem

Alles gecombineerd in één systeem. Wat wil je nog meer? Dürr Dental ontwikkelde met Orotol al in 1965 het eerste desinfectiemiddel voor zuiginstallaties. Dit was het begin van de voortdurende uitbreiding van onze expertise op het gebied van hygiëne. Tegenwoordig vertrouwen tandartsen in de hele wereld op de systeemhygiëne van Dürr Dental die u en uw praktijk uitgebreid beschermt. De beste kwaliteit met tientallen jaren ervaring gaat voortdurend gepaard met innovaties die gericht zijn op de behoeften in de praktijk.



1 Toepassingsgericht

- Toepassingshulp bij het kleurensysteem voor de systeemhygiëne
- Eenvoudige hantering van de producten dankzij de ergonomische flesvorm
- Toepassingshulpmiddelen voor optimale dosering
- Korte inwerktijden en snel drogen zonder resten achter te laten
- Karakteristieke en goed te bewaren flessen van 2,5 l

2 Duurzaam

- Flessen van 100 % recyclebaar materiaal
- Plasticvrije FD 350 green desinfectiedoekjes
- Orotol plus pH 7 en MD 555 cleaner organic voor meer duurzaamheid bij de desinfectie en reiniging van zuiginstallaties



Eenvoudig in de omgang – Sterk in de werking



3 Veilig

- Bewezen, betrouwbaar effect
- VAH-geregistreerd en EN-conform
- Hoog desinfecterend en reinigend vermogen
- Uitgebreid werkingsspectrum

4 Compatibel


- Superieure verbinding van werkzame stoffen
- Bijzonder zacht voor de huid en voedend
- Hoge materiaalcompatibiliteit, aanbevolen door toonaangevende unit-fabrikanten
- Klinisch bewezen

5 Comfortabel

- Eenvoudig en efficiënt in gebruik
- Handige, uniforme verpakkingsgrootte
- Reiniging volgens schema
- Doseerdoppen voor exact mengen
- Zeer zuinig in gebruik

I LIKE IT!

Specifieke toepassingen – Krachtige hygiëne voor
een langere levensduur van uw zuiginstallatie

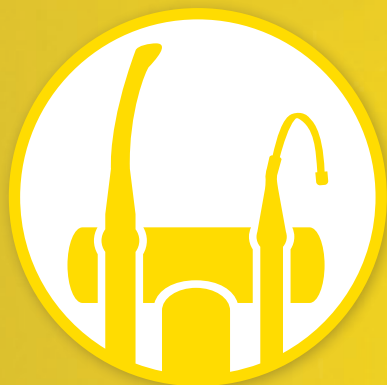

In 1965 heeft Dürr Dental met Orotol de desinfectie van zuiginstallaties uitgevonden en daarmee de tandheelkunde duurzaam positief beïnvloed. Tegenwoordig is Orotol plus wereldwijd het meest gebruikte desinfectiemiddel en wordt perfect aangevuld door het speciale reinigingsmiddel MD 555 cleaner. De beide producten zijn een perfect op elkaar afgestemd duo als het gaat om de behoedzame en zeer effectieve desinfectie en reiniging van uw zuiginstallatie.

Desinfectie van zuiginstallaties



Het origineel sinds 1965

Orotol plus | Desinfectie van zuiginstallaties

Schuimvrij concentraat voor de gelijktijdige desinfectie, reiniging, ontgeuring en verzorging van alle zuiginstallaties en amalgaam-afscalers in tandheelkundepraktijken

- De oplossing voor besmette zuiginstallaties staat garant voor een veilige bescherming tegen infecties
- Verwijdert de hardnekkigste afzettingen
- Beproefde materiaalcompatibiliteit – aanbevolen door toonaangevende unit-fabrikanten

Effectiviteits-spectrum¹

Bactericide, levurocide, beperkt virucide (omhulde virussen incl. HBV, HCV, HIV en coronavirussen) en adeno- en norovirussen
Kwartaire ammoniumverbindingen

Werkzame stoffen

Eenheden

Ideaal daarbij

1 liter, 2,5 liter

OroCup, MD 550, MD 555 cleaner, MD 555 cleaner organic



Duurzame praktijkhygiëne

Orotol plus pH 7 | Desinfectie van zuiginstallaties



Neutraal en zeer effectief vloeibaar concentraat voor de gelijktijdige desinfectie, reiniging, ontgeuring en verzorging van alle zuiginstallaties en amalgaamafscalers in tandheelkundepraktijken

- Veilige infectiebescherming en een buitengewoon hoge reinigingskracht
- > 95% van de organische ingrediënten is eenvoudig biologisch afbreekbaar volgens de OECD-richtlijn
- Materiaalvriendelijk en schuimvrij

Effectiviteits-spectrum²

Bactericide, levurocide, beperkt virucide (omhulde virussen incl. HBV, HCV, HIV en coronavirussen)

Werkzame stoffen

Eenheden

Ideaal daarbij

2,5 liter

OroCup, MD 550, MD 555 cleaner, MD 555 cleaner organic



Orotol ultra | Desinfectie van zuiginstallaties

Poedervormig concentraat voor de gelijktijdige desinfectie, reiniging, ontgeuring en verzorging van alle zuiginstallaties en amalgaamafscalers in tandheelkundepraktijken

- Verwijdert de hardnekkigste afzettingen, ook op moeilijk bereikbare plekken
- Lage toepassingsconcentratie (al vanaf 1%)

Effectiviteits-spectrum³

Bactericide, tuberculocide, mycobactericide, fungicide, sporicide (tegen clostridium difficile), virucide (omhulde virussen incl. HBV, HCV, HIV, coronavirussen en niet-omhulde virussen zoals adeno-, noro-, polio- en polyomavirussen SV40)
Natriumcarbonaat-peroxohydraat

Werkzame stoffen

Eenheden

Ideaal daarbij

Zakje van 500 g

OroCup, MD 550, MD 555 cleaner, MD 555 cleaner organic



¹ Getest conform EN 13727, EN 14561, EN 13624, EN 14562, EN 14476, EN 17111 en EN 16615.

² Getest conform EN 13727, EN 14561, EN 13624, EN 14562, EN 14476 en EN 17111.

³ Getest conform EN 13727, EN 14561, EN 13624, EN 14562, EN 14348, EN 14563, EN 17126, EN 14476 en EN 17111.

Reiniging van zuiginstallaties en spittonen



Lost profylaxepoeder effectief op

MD 555 cleaner | Speciale reiniger voor zuiginstallaties

Schuimvrij reinigingsconcentraat voor verschillende soorten zuiginstallaties en amalgaamafscheidseers

- Uitstekende intensieve reinigende werking tegen afzettingen (bijv. kalk)
- Zeer goed geschikt voor het verwijderen van residuen uit profylaxepoeders en profylaxe Pearl-producten
- Bewezen materiaalcompatibiliteit – aanbevolen door toonaangevende unit-fabrikanten
- Ideaal in combinatie met Orotol plus

Ingrediënten

Organische en anorganische zuren, schuimvrije detergentia

Eenheden

1 liter, 2,5 liter

Ideaal daarbij

OroCup, Orotol plus, Orotol plus pH 7, Orotol ultra, MD 550



Duurzame praktijkhygiëne

MD 555 cleaner organic | Speciale reiniger voor zuiginstallaties



Schuimvrij reinigingsconcentraat voor verschillende soorten zuiginstallaties en amalgaamafscheidseers

- Uitstekende intensieve reinigende werking tegen afzettingen
- Op basis van citroenzuur, vrij van parfum en kleurstoffen
- Zeer goed geschikt voor het verwijderen van residuen uit profylaxepoeders en profylaxe Pearl-producten
- Ideaal in combinatie met Orotol plus pH 7

Ingrediënten

Organische zuren, schuimvrij detergentia

Eenheden

2,5 liter

Ideaal daarbij

OroCup, Orotol plus, Orotol plus pH 7, Orotol ultra, MD 550



MD 550 | Reinigingsmiddel voor het spittoon

Schuimvrije, gebruiksklare oplossing voor de intensieve reiniging van spittonen

- Gemakkelijke verwijdering van residuen zoals kalk, bloed of plaquekleurmiddelen
- Gelijktijdige reiniging, ontgeuring en verzorging van spittonen
- Zonder schurende ingrediënten – geen krassen op het spittoon
- Antimicrobieel – doeltreffend tegen bacteriën, Tb-bacteriën en schimmels

Werkzame stoffen

Alcoholen

Eenheden

750 ml

Ideaal daarbij

Orotol plus, Orotol plus pH 7, Orotol ultra, MD 555 cleaner, MD 555 cleaner organic

i Waarom is er een speciaal reinigingsmiddel als MD 555 cleaner nodig?

Terwijl Orotol plus organische afzettingen uit het systeem verwijdert, zorgt de speciale reiniger MD 555 cleaner ervoor dat anorganische residuen worden verwijderd. Daaronder vallen onder andere kalk, maar ook profylaxepoeder, dat tegenwoordig steeds vaker wordt gebruikt. Zonder toepassing van MD 555 cleaner kan het poeder zich snel afzetten en zo het systeem blokkeren.



OroCup | Verzorgingssysteem

Gebruiksvriendelijk, gesloten verzorgingssysteem voor het desinfecteren en reinigen van zuiginstallaties en amalgaamafscalers

Volume
Ideaal daarbij



Verzorgingssysteem van 2 liter
Orotol plus, Orotol plus pH 7, Orotol ultra,
MD 555 cleaner, MD 555 cleaner organic

- Creëert een lucht/water-mengsel voor een optimale bevochtiging en een effectieve reiniging en desinfectie van het zuigstelsel
- Geschikt voor veilige en efficiënte dosering en toepassing van de oplossing
- Aansluitadapters voor alle zuigslangen

VAN BOVEN NAAR BENEDEN

Met Dürr Dental houdt u uw afzuigstelsel schoon. Daarbij is de juiste toepassing conform specificaties van de fabrikant van beslissend belang.

Bekijk de video voor de juiste toepassing van Orotol plus en MD 555 cleaner:
www.duerdental.com/how-to-orotol

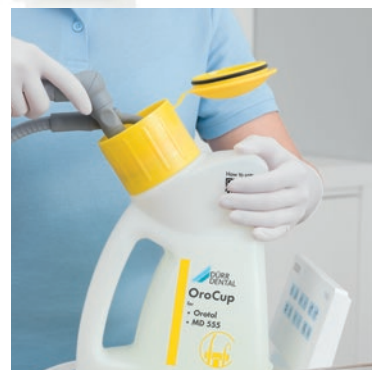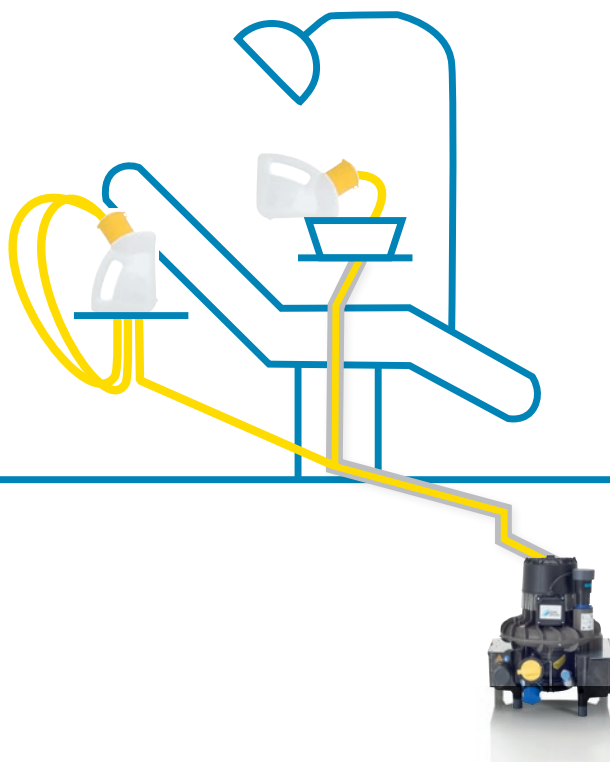

Afdrukken en tandtechnische werkzaamheden



MD 530 | Cementverwijderaar en prothesereinigser

Gebruiksklare oplossing voor het verwijderen van bijv. cement, tandsteen, rokersvlekken, oxidelagen

- Intensieve reinigingswerking en residuvrije verwijdering van in zuur oplosbare aanslag
- Goede materiaalcompatibiliteit
- Geschikt voor gebruik in ultrasoonbaden

**Toepassings-
gebieden**

Protheses, bruggen, kronen, spatels, glas, etc.

Ingrediënten

Anorganische zuren, detergentia

Eenheden

2,5 liter

Ideaal daarbij

Hygobox



Ook te gebruiken als tray-reinigser

MD 535 | Gipsverwijderaar

Gebruiksklare oplossing voor het verwijderen van gips en alginaten

- Speciale reiniger met bijzonder snelle werking
- Uitstekende, residuvrije reiniging
- Met activiteitsindicator
- Geschikt voor gebruik in ultrasoonbaden

**Toepassings-
gebieden**

Afdruklepels, roerspatels, gipsmessen, mengbe-
kers, diverse soorten prothesematerialen, enz.

Ingrediënten

Alkalische reinigingscomponenten
en complexvormers

Eenheden

2,5 liter

Ideaal daarbij

Hygobox



Standtijd van 7 dagen

MD 520 | Afdruk-desinfectie

Volledig virucide gebruiksooplossing voor het efficiënt en materiaalvriendelijk desinfecteren en reinigen van tandheelkundige afdrukken, protheses, enz.

- Bruikbaar voor alginaten, siliconen, polyetherrubber, hydrocolloïden, polysulfiden enz.
- Grotere nauwkeurigheid van het master-model in gips door effectieve reiniging
- Geen verslechtering van maatstabiliteit of gipscompatibiliteit

**Effectiviteits-
spectrum¹**

Bactericide, tuberculocide, levurocide, virucide (omhulde virussen incl. HBV, HCV, HIV en coronavirussen en niet-omhulde virussen zoals adenovirussen, polyomavirussen SV40, noro- en poliovirussen)

**Werkzame
stoffen**

Kwartaire ammoniumverbindingen,
glutardialdehyde

Eenheden

2,5 liter, 10 liter

Ideaal daarbij

MD 520 desinfectiebus, Hygobox

Toebehoren



Hygobox

Stevige, duurzame transport- en desinfectiebox

- Ergonomisch gevormde handgrepen voor veilig transport
- Kantel veilige uitlekstand voor de ingebouwde zeefinzet
- Instrumenten komen niet vast te zitten dankzij speciaal gevormde sleuven

Kleurvarianten Antraciet deksel met blauwe of gele zeefinzet, deksel in 5 verschillende kleuren verkrijgbaar met witte zeefinzet

Volume Inhoud van 3 liter

Afmetingen (HxBxD)

Ideaal daarbij MD 520, MD 535, ID 212, ID 212 forte plus, ID 213, ID 215



MD 520 | Desinfectiebus

Bus voor de dampdesinfectie en reiniging met MD 520 afdruk-desinfectie

- Bevat een speciale bevestiging in het deksel voor max. 2 afdruklepels
- Met praktische bezet-weergave/herinneringshulp bij de bevestiging

Volume Maximaal volume van 1 liter

Grootte: Hoogte 19 cm, Ø 11,7 cm

Ideaal daarbij MD 520 afdruk-desinfectie



Zo eenvoudig is het

Scan de QR-code voor waardevolle tips over afdruk-desinfectie.



I LIKE IT!

Oppervlakken – Glanzend schoon met
maximale veiligheid



Een grondige, maar ook behoedzame reiniging en desinfectie van oppervlakken vermindert de risico's en draagt tegelijkertijd bij tot het waardebehoud van de praktijkinrichting. Hiervoor biedt Dürr Dental een groot aantal concentraten en gebruiksooplossingen alsmede een uitgebreid assortiment doekjes aan.

Alcoholvrije desinfectie en reiniging



FD 300 | Oppervlaktedesinfectie

Volledig virucide en alcoholvrij concentraat voor de reiniging en desinfectie van oppervlakken van niet-invasieve medische hulpmiddelen en medische inventaris

- Zeer snelle inwerktijd
- Zuinig in gebruik: tot 250 liter gebruiksooplossing bij 1 %
- Goede materiaalcompatibiliteit

Effectiviteits-spectrum¹

Bactericide, levurocide, tuberculocide, beperkt virucide (omhulde virussen incl. HBV, HCV, HIV en coronavirussen), beperkt virucide PLUS (incl. rotavirussen, adenovirussen, norovirussen), virucide (omhulde en niet-omhulde virussen)

Werkzame stoffen

Alkylamines, kwartaire ammoniumverbindingen

Eenheden

2,5 liter

Ideaal daarbij

Droge doekjes (z. pagina 21)



FD 312 | Oppervlaktedesinfectie*

Alcoholvrij concentraat voor de reiniging en desinfectie van oppervlakken van niet-invasieve medische hulpmiddelen, medische apparatuur en vloeren

- Zuinig in gebruik: tot 250 liter gebruiksooplossing bij 1 %
- Goede materiaalcompatibiliteit
- Bijzonder aangename geur

Effectiviteits-spectrum²

Bactericide, levurocide, beperkt virucide (omhulde virussen incl. HBV, HCV, HIV en coronavirussen), beperkt virucide PLUS (incl. rotavirussen, adenovirussen, norovirussen)

Werkzame stoffen

Alkyl(C12-18)dimethylbenzylammoniumchloride (kwartaire ammoniumverbindingen)

Eenheden

2,5 liter

Ideaal daarbij

Droge doekjes (z. pagina 21)



FD 312 wet wipes | Oppervlaktedesinfectie*

Alcoholvrije desinfectie- en reinigungsdoekjes voor vloeren, praktijkinventaris, etc.

- Royale oppervlaktebevochtiging
- Doeken in scheurbestendige honingraatstructuur
- Met een aangename geur

Effectiviteits-spectrum²

Bactericide, fungicide, beperkt virucide (omhulde virussen incl. HBV, HCV, HIV en coronavirussen)

Werkzame stoffen

Alkyl(C12-18)dimethylbenzylammoniumchloride (kwartaire ammoniumverbindingen)

Eenheden

Verpakking van 15 doekjes

Doekafmeting

22 x 42 cm



¹ Getest conform EN 13727, EN 13624, EN 14348, EN 14476 en EN 16615.

² Getest conform EN 13727, EN 13624, EN 14476 en EN 16615.

* Desinfectiemiddel voorzichtig gebruiken. Lees vóór gebruik altijd het etiket en de productinformatie.

Alcoholische gebruiksooplossingen voor desinfectie

Ook ongeparfumeerd verkrijgbaar

FD 322 | Sneldesinfectie

Snel werkende gebruiksooplossing voor het desinfecteren van alcoholbestendige oppervlakken van invasieve en niet-invasieve medische hulpmiddelen en inventaris

- Zeer korte inwerktijd
- Residuvrij droogproces
- Goede materiaalcompatibiliteit

Effectiviteits-spectrum¹

Bactericide, tuberculocide, fungicide, beperkt virucide (omhulde virussen incl. HBV, HCV, HIV en coronavirussen), beperkt virucide PLUS (incl. rotavirussen, adenovirussen, norovirussen), polyomavirussen SV40
Alcoholen

Werkzame stoffen Eenheden

750 ml voor Hygowipe Plus, 1 liter, 2,5 liter, 10 liter
FD 322 parfumvrij: 2,5 liter, 10 liter

Ideaal daarbij

Droge doekjes (z. pagina 21),
500 ml sproeifles, sproeikop



FD 333 | Sneldesinfectie

Snel werkende gebruiksooplossing voor het desinfecteren van alcoholbestendige oppervlakken van invasieve en niet-invasieve medische hulpmiddelen en inventaris

- Goede materiaalcompatibiliteit
- Frisse citroengeur
- Droogt snel op

Effectiviteits-spectrum¹

Bactericide, tuberculocide, fungicide, beperkt virucide (omhulde virussen incl. HBV, HCV, HIV en coronavirussen), beperkt virucide PLUS (incl. rota-, adeno-, norovirussen)

Werkzame stoffen Eenheden

Alcoholen, kwartaire ammoniumverbindingen

750 ml voor Hygowipe Plus, 1 liter, 2,5 liter, 10 liter

Ideaal daarbij

Droge doekjes (z. pagina 21),
500 ml sproeifles, sproeikop



FD 333 forte | Sneldesinfectie

Volledig virucide gebruiksooplossing voor het desinfecteren van alcoholbestendige oppervlakken van invasieve en niet-invasieve medische hulpmiddelen en inventaris

- Goede materiaalcompatibiliteit
- Frisse citroengeur
- Snelle desinfecterende werking

Effectiviteits-spectrum¹

Bactericide, tuberculocide, mycobactericide, Fungicide, beperkt virucide (omhulde virussen incl. HBV, HCV, HIV en coronavirussen), beperkt virucide PLUS (incl. rota-, adeno-, norovirussen), virucide (omhulde en niet-omhulde virussen)

Werkzame stoffen Eenheden

Alcoholen, kwartaire ammoniumverbindingen

1 liter, 2,5 liter, 10 liter

Ideaal daarbij

Droge doekjes (z. pagina 21),
500 ml sproeifles, sproeikop



Alcoholgereduceerd

FD 366 sensitive | desinfectie van gevoelige oppervlakken

Alcoholgereduceerde gebruiksooplossing voor sneldesinfectie van gevoelige oppervlakken van invasieve en niet-invasieve medische hulpmiddelen en inventaris

- Snelle desinfecterende werking
- Bewezen materiaalcompatibiliteit – aanbevolen door toonaangevende unit-fabrikanten

Effectiviteits-spectrum¹

Bactericide, tuberculocidem, levurocide, beperkt virucide (omhulde virussen incl. HBV, HCV, HIV en coronavirussen), norovirussen
Alcoholen, kwartaire ammoniumverbindingen

Werkzame stoffen Eenheden

750 ml voor Hygowipe Plus, 1 liter, 2,5 liter, 10 liter

Ideaal daarbij

Droge doekjes (z. pagina 21),
500 ml sproeifles, sproeikop,
FD 360 kunstleerreiniger



Met alcohol geïmpregneerde desinfectiedoekjes

Voor alcoholbestendige oppervlakken, verkrijgbaar in 3 afmetingen



FD 322 wipes | Sneldesinfectie

Desinfectiedoekjes voor sneldesinfectie van alcoholbestendige oppervlakken van invasieve en niet-invasieve medische hulpmiddelen en inventaris

- Zeer korte inwerktijd
- Residuvrij droogproces
- Goede materiaalcompatibiliteit

Effectiviteits-spectrum ¹

Bactericide, tuberculocide, fungicide, beperkt virucide (omhulde virussen incl. HBV, HCV, HIV en coronavirussen), beperkt virucide PLUS (incl. rota-, adeno-, norovirussen), polyomavirussen SV40

Werkzame stoffen

Alcoholen

Eenheden

Dispenserdoos met 100 doekjes, navulverpakking met 100 doekjes

Doekafmeting

20 x 30 cm



FD 322 top wipes | Sneldesinfectie

Productdetails: zie hierboven

Eenheden

Verpakking van 50 doekjes

Doekafmeting

17,5 x 25 cm



FD 322 premium wipes | Sneldesinfectie

Productdetails: zie hierboven

Eenheden

Dispenserdoos met 80 doekjes, navulverpakking met 80 doekjes

Doekafmeting

14 x 19 cm



Met alcohol geïmpregneerde desinfectiedoekjes

Ongeparfumeerd, verkrijgbaar in 2 afmetingen



Ongeparfumeerd

FD 333 wipes | Sneldesinfectie

Desinfectiedoekjes voor sneldesinfectie van alcoholbestendige oppervlakken van invasieve en niet-invasieve medische hulpmiddelen en inventaris

- Snelle desinfecterende werking
- Droogt snel op
- Ongeparfumeerd

Effectiviteits-spectrum¹

Bactericide, tuberculocide, fungicide, beperkt virucide (omhulde virussen incl. HBV, HCV, HIV en coronavirussen), beperkt virucide PLUS (incl. rota-, adeno-, norovirussen)

Werkzame stoffen

Alcoholen, kwartaire ammoniumverbindingen

Eenheden

Dispenserdoos met 110 doekjes, navulverpakking met 110 doekjes

Doekafmeting

14 x 22 cm



Ongeparfumeerd

FD 333 top wipes | Sneldesinfectie

Productdetails: zie hierboven

Eenheden

Verpakking van 50 doekjes,

Doekafmeting

17,5 x 25 cm

Volledig virucide, verkrijgbaar in 2 afmetingen



FD 333 forte wipes | Sneldesinfectie

Volledig virucide gebruiksklare desinfectiedoekjes voor sneldesinfectie van alcoholbestendige oppervlakken van invasieve en niet-invasieve medische hulpmiddelen en inventaris

- Snelle desinfecterende werking
- Frisse citroengeur

Effectiviteits-spectrum¹

Bactericide, tuberculocide, mycobactericide, fungicide, beperkt virucide (omhulde virussen incl. HBV, HCV, HIV en coronavirussen), beperkt virucide PLUS (incl. rota-, adeno-, norovirussen), virucide (omhulde en niet-omhulde virussen)

Werkzame stoffen

Alcoholen, kwartaire ammoniumverbindingen

Eenheden

Dispenserdoos met 100 doekjes, navulverpakking met 100 doekjes

Doekafmeting

20 x 30 cm



FD 333 forte premium wipes | Sneldesinfectie

Productdetails: zie hierboven

Eenheden

Dispenserdoos met 80 doekjes, navulverpakking met 80 doekjes

Doekafmeting

14 x 19 cm



Voor kleine oppervlakken, verkrijgbaar in 2 varianten



FD 350 | Sneldesinfectie

Desinfectiedoekjes voor sneldesinfectie van alcoholbestendige oppervlakken van invasieve en niet-invasieve medische hulpmiddelen en inventaris

- Snelle desinfecterende werking
- Droogt snel en streepvrij op
- 3 verschillende geuren:
Classic, Flower, Lemon

Effectiviteits- spectrum¹

Bactericide, tuberculocide, fungicide, beperkt virucide (omhulde virussen incl. HBV, HCV, HIV en coronavirussen), beperkt virucide PLUS (incl. rota-, adeno-, norovirussen), polyomavirussen SV40

Werkzame stoffen

Alcoholen

Eenheden

Dispenserdoos met 110 doekjes, navulverpakking met 110 doekjes

Doekafmeting

14 x 22 cm



Kunststofvrije natuurvezels

FD 350 green | Sneldesinfectie

Gebruiksklare desinfectiedoekjes van kunststofvrije natuurvezels voor sneldesinfectie van alcoholbestendige oppervlakken van invasieve en niet-invasieve medische hulpmiddelen en medische inventaris

- Snelle desinfecterende werking
- Droogt snel en streepvrij op
- Goede materiaalcompatibiliteit en bijzonder groot bereik per doekje

Effectiviteits- spectrum¹

Bactericide, tuberculocide, fungicide, beperkt virucide (omhulde virussen incl. HBV, HCV, HIV en coronavirussen), beperkt virucide PLUS (incl. rota-, adeno-, norovirussen), polyomavirussen SV40

Werkzame stoffen

Alcoholen

Eenheden

Dispenserdoos met 50 doekjes, navulverpakking met 50 doekjes

Doekafmeting

14 x 19 cm



Onze duurzame oppervlaktedesinfectie

De desinfectiedoekjes FD 350 green zijn gemaakt van kunststofvrije natuurvezels en zijn milieuvriendelijk geproduceerd.

green



Scan de QR-code
voor meer informatie.



Doekjes met een gereduceerd alcoholgehalte

Voor gevoelige oppervlaktes, verkrijgbaar in 2 maten



Alcoholgereduceerd

FD 366 sensitive wipes | Sneldesinfectie

Gebruiksklare desinfectiedoekjes voor sneldesinfectie van gevoelige oppervlakken van invasieve en niet-invasieve medische hulpmiddelen en inventaris

- Snelle desinfecterende werking
- Aanbevolen door unitfabrikanten
- Ongeparfumeerd

Effectiviteits-spectrum¹

Bactericide, tuberculocidem, levurocide, beperkt virucide (omhulde virussen incl. HBV, HCV, HIV en coronavirussen), norovirussen

Werkzame stoffen

Alcoholen, kwartaire ammoniumverbindingen

Eenheden

Dispenserdoos met 100 doekjes, navulverpakking met 100 doekjes

Doekafmeting

20 x 30 cm



Alcoholgereduceerd

FD 366 sensitive top wipes | Sneldesinfectie

Productdetails: zie hierboven

Eenheden

Verpakking van 50 doekjes


Doekafmeting

17,5 x 25 cm

Materiaalcompatibiliteit van desinfectiemiddelen

Een desinfectiemiddel met een hoog alcoholgehalte kan gevoelige materialen aantasten en hun houdbaarheid verminderen. Gebruik daarom voor verschillende materialen geschikte desinfectiemiddelen.

Meer informatie in de video op duerrdental.com/FD366

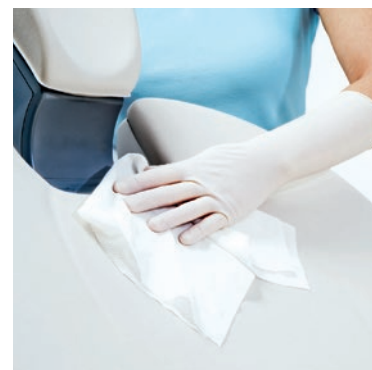

Droge doekjes

Ideaal voor grote oppervlakken, verkrijgbaar in 2 maten



Universeel bruikbaar

FD multi wipes

Universele, droge doekjes, impregneerbaar met desinfectie- en reinigingsmiddelen

- Universeel bruikbare doekjes in combinatie met oppervlakdesinfectiemiddelen
- Pluisvrij en scheurbestendig
- Zeer goede bevochtiging en geen krassen op oppervlakken

Eenheden

Dispenserdoos met 180 doekjes, navulverpakking met 180 doekjes
20 x 30 cm

Doekafmeting Ideaal daarbij

Met alle Dürr Dental gebruiksooplossingen en concentraten voor oppervlakdesinfectie te gebruiken. Getest en goedgekeurd conform de 4-velden-test (EN 16615).



Universeel bruikbaar

FD multi wipes compact

Productdetails: zie hierboven

Eenheden

Dispenserdoos met 60 doekjes, navulverpakking met 60 doekjes
29 x 30 cm

Doekafmeting Ideaal daarbij

Met alle Dürr Dental gebruiksooplossingen en concentraten voor oppervlakdesinfectie te gebruiken. Getest en goedgekeurd conform de 4-velden-test (EN 16615).

Reiniging en verzorging van kunstleer

Aanbevolen door unitfabrikanten



FD 360 reiniging en verzorging van kunstleer

Reinigingsvloeistof voor diepe reiniging en verzorging van kunstleren oppervlakken

- Materiaalvriendelijke reiniger gecombineerd met verzorgingsmiddel voor blijvende resultaten
- Intensieve reinigungsactie – verwijdert vlekken van alle soorten, randen en verkleuringen
- Bewezen materiaalcompatibiliteit – aanbevolen door toonaangevende unit-fabrikanten
- Bij behandelunits ideaal in combinatie met FD 366 sensitive

Ingrediënten

Speciale detergentia, siliconeverbindingen en verzorgingsformule met avocado-olie

Eenheden

Set met sprayfles van 250 ml, 1 FD polijstdoek en 5 speciale sponzen

Ideaal daarbij

FD 366 sensitive, FD 366 sensitive wipes, FD 366 sensitive top wipes, FD polijstdoek



FD polijstdoek

Microvezeldoek met speciale vezels voor het voorzichtig reinigen en polijsten van gevoelige oppervlakken

- Buitengewoon grondig door de fijne vezels
- Snel en streepvrij polijsten
- Verwijdert kleine vuil- en stofdeeltjes dankzij antistatische eigenschappen
- Kan worden gewassen tot 60 °C

Eenheden

Verkrijgbaar als losse doekjes

Doekafmeting

32 x 32 cm

I LIKE IT!

Behoedzame handhygiëne voor een
effectieve infectiepreventie



De desinfectie van de handen voor infectieprofylaxe is doorslaggevend. Daarnaast staat natuurlijk ook de bescherming van de gevoelige huid centraal. De Dürr Dental Hd-preparaten zijn dermatologisch getest en zorgen voor een balans tussen effectieve en behoedzame hygiëne.

Handendesinfectie en -reiniging



HD 420 plus | Handendesinfectie*

Wrijfpreparaat op basis van alcohol voor hygiënische en chirurgische handendesinfectie

- Bevat vochtinbrengende stoffen
- Dermatologisch getest
- Ongeparfumeerd

Effectiviteits-spectrum

Hygiënische handdesinfectie: bactericide (inclusief tuberkelbacillus/mycobacteriën), levurocide en werkzaam tegen omhulde virussen (beperkt virucide) evenals tegen rota-, adeno- en norovirussen (beperkt virucide PLUS); chirurgische handdesinfectie: bactericide en levurocide 2-propanol, 1-propanol

Werkzame stoffen

Eenheden

500 ml, 1 liter, 2,5 liter¹, 10 liter¹

Ideaal daarbij

Preparaatdispenser (z. pagina 24/25)



HD 435 | waslotion

Milde waslotion voor de handen

- Ondersteunt de natuurlijke beschermlaag van de huid – voor de huid typische pH-waarde
- Dermatologisch getest

Eenheden

500 ml, 1 liter, 2,5 liter

Ideaal daarbij

Preparaatdispenser (z. pagina 24/25)



¹ Producten die voor chirurgische handdesinfectie worden gebruikt, mogen niet worden bij- of omgevuld.

* Desinfectiemiddel voorzichtig gebruiken. Lees vóór gebruik altijd het etiket en de productinformatie.

(Goedkeuringsnummer: EU-0032838-0001 1-1; registratiehouder: orochemie GmbH + Co. KG, Max-Planck-Straße 27, 70806 Kornwestheim, Duitsland)

Preparaatdispensers



Met sensor

Touchless XT 1000 | Universele preparaatdispenser

Sensordispenser op batterijen voor de handenvrije, hygiënische toepassing van handpreparaten

- Werkt op batterijen met batterij-indicatie door akoestisch signaal
- Hoge hygiënestandaard door behuizing in geanodiseerd aluminium
- Autoclaveerbare roestvrijstalen pomp of wegwerppomp

Afmetingen (BxHxD)

9,2 x 33,0 x 21,0 cm

Eenheden

voor flessen 1 liter

Ideaal daarbij

HD 420 plus, HD 435 in een fles van 500 ml of 1 liter, schaalhouder, wegwerppompen



Optioneel met sensor

RX | Universele preparaatdispenser

Handmatig bediende of sensorbestuurde universele preparaatdispenser voor de toepassing van handpreparaten

- Handmatig (RX 5 M, RX 10 M) of contactloos (RX 5 T)
- Behuizing en opvangbak van stevig, wit kunststof
- Duurzame plasticpomp

Afmetingen (BxHxD)

RX 5 M: 10,2 x 27,0 x 14,2 cm,
RX 10 M: 33,4 x 18,4 x 21,8 cm,
RX 5 T: 27 x 15,7 x 22,6 cm

Eenheden

voor fles 500 ml (RX 5 M en RX 5 T),
voor fles 1 liter (RX 10 M)

Ideaal daarbij

HD 420 plus, HD 435 in de fles van 500 ml of fles van 1 liter



S 400 & L 1000 | Universele preparaatdispenser

Universele preparaatdispenser voor wandmontage voor de toepassing van handpreparaten

- Zeer eenvoudig in gebruik
- Duurzame uitvoering in aluminium en roestvrij staal
- Autoclaveerbare pomp of wegwerppomp

Afmetingen (BxHxD)

S 400: 8,2 x 24,5 x 8,2 cm,
L 1000: 9,2 x 29 x 9 cm,
armhendellengte: S 400: 16 cm,
L 1000: 22,5 cm

Eenheden

voor fles 500 ml (S 400),
voor fles 1 liter (L 1000)

Ideaal daarbij

HD 420 plus, HD 435 in een fles van 500 ml of 1 liter, wegwerppompen



Een video van de Touchless XT

Bekijk hoe de preparaatdispenser Touchless XT wordt gebruikt



Hygiënische handendesinfectie

Inwrijfprocedure conform EN 1500



Handpalm op handpalm



Rechterhandpalm over de linkerhandrug en de linkerhandpalm over de rechterhandrug



Handpalm op handpalm met kruiselings over elkaar gelegde, gespreide vingers



Buitenkant van de vingers op de tegenoverliggende handpalm met kruiselings over elkaar gelegde vingers



Cirkelvormig wrijven van de duim in de gesloten linkerhandpalm en omgekeerd



Cirkelvormig wrijven met gesloten vingertoppen van de rechterhand in de linkerhandpalm en omgekeerd



De zichtbaar schone handen moeten tijdens de inwerktijd vochtig worden gehouden, eventueel vereist dit een meervoudige afname van handdesinfectiemiddel (in totaal min. 3 ml).



Video over handendesinfectie

Scan de QR-code voor een stap-voor-stap-handleiding



I LIKE IT!

Van handmatige instrumentenreiniging tot
aan documentatie en opslag



Voor de handmatige desinfectie en reiniging van algemene, chirurgische en gevoelige instrumenten kiest Dürr Dental steeds voor aldehydevrije, niet-fixerende ingrediëntencombinaties. Die zorgen ervoor dat de instrumenten met een betrouwbaar reinigingseffect behoedzaam worden gedesinfecteerd. Behoedzame omgang met de instrumenten, geen compromissen tegen kiemen – u kunt vertrouwen op de instrumentendesinfectie van Dürr Dental.

Instrumentendesinfectie



Standtijd van maximaal 7 dagen

ID 212 | Instrumentendesinfectie

Concentraat voor de materiaalbesparende reiniging en desinfectie van instrumenten

- Geschikt voor algemene, chirurgische en roterende instrumenten
- Zeer korte inwerktijd
- Uitstekende materiaalcompatibiliteit voor instrumenten van rubber/siliconen materiaal

Effectiviteits-spectrum¹

Bactericide, tuberculocide, levurocide in het ultrasoonstelsel, levurocide, beperkt virucide (omhulde virussen incl. HBV, HCV, HIV en coronavirussen) en niet-omhulde adenovirussen en norovirussen

Werkzame stoffen

Kwartaire ammoniumverbindingen

Eenheden

1 liter, 2,5 liter

Ideaal daarbij

Hygobox



Standtijd van maximaal 7 dagen

ID 212 forte plus | Instrumentendesinfectie

Concentraat voor de reiniging en desinfectie van algemene, chirurgische en roterende instrumenten

- Uitstekende materiaalcompatibiliteit
- Standtijd van maximaal 7 dagen
- Snelle desinfectie en reiniging

Effectiviteits-spectrum¹

Bactericide, tuberculocide, levurocide in het ultrasoonstelsel, levurocide, beperkt virucide (omhulde virussen incl. HBV, HCV, HIV en coronavirussen) en niet-omhulde adenovirussen en norovirussen

Werkzame stoffen

Kwartaire ammoniumverbindingen

Eenheden

1 liter, 2,5 liter

Ideaal daarbij

Hygobox



Standtijd van maximaal 14 dagen

ID 213 | Instrumentendesinfectie

Concentraat voor de reiniging en desinfectie van algemene, chirurgische en roterende instrumenten met breed werkingsspectrum

- Zeer zuinig door lange standtijd van maximaal 14 dagen
- Goede materiaalcompatibiliteit dankzij corrosieremmers

Effectiviteits-spectrum¹

Bactericide, tuberculocide, mycobactericide in het ultrasoonstelsel, levurocide, beperkt virucide (omhulde virussen incl. HBV, HCV, HIV), norovirussen, polyomavirussen SV40

Werkzame stoffen

Alkylamines, kwartaire ammoniumverbindingen

Eenheden

1 liter, 2,5 liter

Ideaal daarbij

Hygobox



¹ Getest conform EN 13727, EN 13624, EN 14348, EN 14476, EN 14561, EN 14562, EN 14563 en EN 17111.

Instrumentenreiniging en borendesinfectie



ID 215 | Enzymatisch reinigingsmiddel voor instrumenten

Concentraat voor handmatig, enzymatisch reinigen van instrumenten voor het desinfecteren

- Met aangetoonde persoonlijke bescherming door anti-microbiële werking
- Buitengewone reinigende werking – lost de hardnekkigste verontreinigingen op
- Goede materiaalcompatibiliteit

Persoonlijke bescherming¹
Werkzame stoffen
Eenheden
Ideaal daarbij

Bactericide, levurocide, beperkt virucide (omhulde virussen incl. HBV, HCV, HIV) kwartaire ammoniumverbindingen, guanidineverbindingen
2,5 liter
Hygobox



Standtijd van maximaal 7 dagen

ID 220 | Borendesinfectie

Volledig virucide, gebruiksklare oplossing voor het reinigen en desinfecteren van alcoholbestendige roterende instrumenten

- Buitengewone reinigingskracht speciaal voor de fijne structuren van boren en frezen
- Uitstekende bescherming tegen corrosie en lange standtijd van maximaal 7 dagen
- Zeer korte inwerktijd

Effectiviteits-spectrum²

Bactericide, mycobactericide, tuberculocide, levurocide, fungicide, beperkt virucide PLUS (omhulde virussen incl. HBV, HCV, HIV en corona virussen en niet-omhulde virussen zoals adenovirussen, polyomavirussen SV40, norovirussen en poliovirussen)

Werkzame stoffen
Eenheden

Alcoholen in alkalisch milieu
1 liter, 2,5 liter

Hygobox

Stevige, duurzame transport- en desinfectiebox

- Ergonomisch gevormde handgrepen voor veilig transport
- Kantelbare uitlekstand voor de ingebouwde zeefinzet
- Instrumenten komen niet vast te zitten dankzij speciaal gevormde sleuven

Kleurvarianten

Antraciet deksel met blauwe of gele zeefinzet, deksel in 5 verschillende kleuren verkrijgbaar met witte zeefinzet

Volume
Afmetingen (HxBxD)

Inhoud van 3 liter
13 x 32,5 x 21 cm

Ideaal daarbij

ID 212, ID 212 forte plus, ID 213, ID 215, MD 520, MD 535



¹ Getest conform EN 13727, EN 13624, EN 14476, EN 14561, EN 14562 en EN 17111.

² Getest conform EN 13727, EN 13624, EN 14348, EN 14476, EN 14561, EN 14562, EN 14563 en EN 17111.

Apparatuur



Hygopac

Roterend sealapparaat voor de verpakking van doorzichtige sterilisatieverpakkingen

- Optimale persdruk voor een gelijkblijvende sealnaadkwaliteit
- Transportbandprincipe om snel en rationeel te werken
- Traploze temperatuurregeling voor de optimale sealnaad

Afmetingen (HxBxD)

16,0 x 43,5 x 13,5 cm

Ideaal daarbij

Hygofol zak, Hygofol rollen, instrumententafel, Hygofol station

Conform DIN EN ISO 11607-2

Hygopac View

Valideerbaar rotterend sealapparaat voor de normconforme sealing van verpakkingen voor steriele producten conform DIN EN ISO 11607-2

- Buitengewoon compact design voor zoveel mogelijke ruimtebesparing
- Procesdocumentatie door opslag op SD-kaart en netwerkverbinding

Bedieningscomfort

Intutief bedieningsconcept via touch-display

Afmetingen (HxBxD)

17,0 x 37,0 x 14,0 cm

Ideaal daarbij

Hygofol zak, Hygofol rollen, instrumententafel, Hygofol station



Hygofol

De verpakking voor steriele producten biedt met haar meerlaagse laminaatfolie en bijzonder scheurvast sterilisatiepapier maximale veiligheid

- Hoge penetratieresistentie en uitstekende mechanische stevigheid
- Hoge treksterkte van de sealnaad
- Hygofol als praktische, geprefabriceerde zak in 3 afmetingen
- Hygofol voor de individuele fabricage als rol in 5 afmetingen

Eenheden Rollen

Hygofol rollen, Hygofol zakken

Rollengte: 100 m

Rollbreedte: 5 / 7,5 / 10 / 15 / 25 cm

Zaklengte: 30 cm

Zakbreedte: 7,5 / 10 / 15 cm



Hygoprint

Systeem voor de identificatie van verpakking voor steriele producten

- Snelle en eenvoudige documentatie van het sterilisatieproces
- Volledige identificatie met alle relevante gegevens

Bedieningscomfort

Bijzonder licht en handig

Ideaal daarbij

Enkel of dubbelzijdig zelfklevende etiketten, documentatieblok van 100 bladen, reserve-inktrol

Het beste voor uw praktijk

Hygiëne en techniek

- Onverslaanbaar: technische oplossingen in combinatie met reinigings- en desinfectiemiddelen
- Meer dan 80 jaar ervaring in de medische technologie
- Ongeveer 60 jaar ervaring en innovatie op het gebied van praktijkhygiëne
- Materiaalvriendelijke producten blinken uit door een eenvoudig gebruik en snelle toepassing

Advies en service


- Oplossingsgerichte praktijktips en individueel productadvies
- Ondersteuning bij het opbouwen van een kwaliteitsmanagementsysteem
- Vervolgopleidingen, trainingen in teamverband en advies in het veld
- Deskundigheid van gekwalificeerde trainers
- Talrijke service-materialen

Wij hechten bijzondere waarde aan het garanderen van een maximale kwaliteitsstandaard. Een claim die vooral door onze service-afdeling duurzaam wordt ondersteunt. Met ons uitgebreide service-aanbod ondersteunen wij u snel en transparant.



Dürr Dental service

duerrdental.com/service

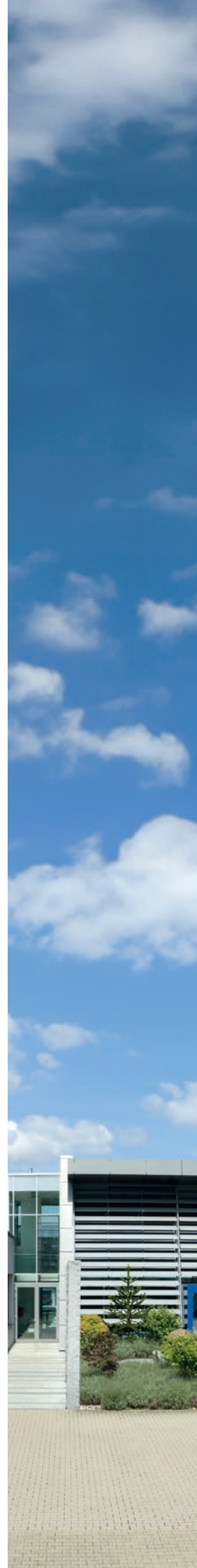

Dürr Dental – op ons kunt u vertrouwen!

Naast de producten voor de systeemhygiëne bieden wij een uitgebreid assortiment aan diensten om uw tandheelkundige team bij hun dagelijkse werkzaamheden te ondersteunen. Onze lokale adviseurs staan direct voor uw team klaar. Ons serviceteam helpt u bij vragen over onze producten.

Uw contactpersoon vinden:

duerrdental.com/contact



Werkingsspectra en toepassingen

Desinfectie	Reiniging	VAH-geregistreerd *	IHO-desinfectiemiddelijst	getest conform EU-normen	Bactericide	Tuberculocide	Levurocide	Fungicide	Beperkt virucide	Beperkt virucide PLUS	Virucide	Concentratie/inwerktijd in min.	Standtijd in dagen	Classificatie
-------------	-----------	---------------------	---------------------------	--------------------------	-------------	---------------	------------	-----------	------------------	-----------------------	----------	---------------------------------	--------------------	---------------

Zuiginstallatie-hygiëne en specifieke toepassingen

Orotol plus Desinfectie van zuiginstallaties	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	2% / 5 ³		Medisch hulpmiddel
Orotol plus pH 7 Desinfectie van zuiginstallaties	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	2% / 30 ³		Medisch hulpmiddel
Orotol ultra Desinfectie van zuiginstallaties	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	1% / 5 ³		Medisch hulpmiddel
MD 520 Afdrukdesinfectie	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	100% / 5 ³	7	Medisch hulpmiddel
MD 530 Cementverwijderaar/prothesereinig	■											100%		Medisch hulpmiddel
MD 535 Gipsverwijderaar	■											100%		Medisch hulpmiddel
MD 550 Reinigingsmiddel voor de spittooschaal	■			■	■		■					100% / 5 ³		Medisch hulpmiddel
MD 555 cleaner Speciale reiniger voor afzuigsystemen	■											5% / 30-120		Medisch hulpmiddel
MD 555 cleaner organic Speciale reiniger voor zuiginstallaties	■											5% / 30-120		Medisch hulpmiddel

FD oppervlakte-hygiëne

FD 300 Oppervlaktedesinfectie	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	1% / 2% / 15 / 5 ³		Medisch hulpmiddel
FD 312 Oppervlaktedesinfectie ¹	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	1% / 15 ³		Biocide
FD 312 wet wipes Oppervlaktedesinfectie ¹	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	gebruiksklaar / 15 ³		Biocide
FD 322 Sneldesinfectie	■		■	■	■	■	■	■	■	■	■	100% / 1 ³		Medisch hulpmiddel
FD 322 premium wipes Sneldesinfectie	■		■	■	■	■	■	■	■	■	■	gebruiksklaar / 1 ³		Medisch hulpmiddel
FD 322 top wipes Sneldesinfectie	■		■	■	■	■	■	■	■	■	■	gebruiksklaar / 1 ³		Medisch hulpmiddel
FD 322 wipes Sneldesinfectie	■		■	■	■	■	■	■	■	■	■	gebruiksklaar / 1 ³		Medisch hulpmiddel
FD 333 Sneldesinfectie	■		■	■	■	■	■	■	■	■	■	100% / 1 ³		Medisch hulpmiddel
FD 333 wipes Sneldesinfectie	■		■	■	■	■	■	■	■	■	■	gebruiksklaar / 1 ³		Medisch hulpmiddel
FD 333 top wipes Sneldesinfectie	■		■	■	■	■	■	■	■	■	■	gebruiksklaar / 1 ³		Medisch hulpmiddel
FD 333 forte Sneldesinfectie	■		■	■	■	■	■	■	■	■	■	100% / 1 ³		Medisch hulpmiddel
FD 333 forte premium wipes Sneldesinfectie	■		■	■	■	■	■	■	■	■	■	gebruiksklaar / 1 ³		Medisch hulpmiddel
FD 333 forte wipes Sneldesinfectie	■		■	■	■	■	■	■	■	■	■	gebruiksklaar / 1 ³		Medisch hulpmiddel
FD 350 Desinfectiedoekjes	■		■	■	■	■	■	■	■	■	■	gebruiksklaar / 1 ³		Medisch hulpmiddel
FD 350 green Desinfectiedoekjes	■		■	■	■	■	■	■	■	■	■	gebruiksklaar / 1 ³		Medisch hulpmiddel
FD 360 Reiniging en verzorging van kunstleer	■		■	■	■	■	■	■	■	■	■	gebruiksklaar		Medisch hulpmiddel
FD 366 sensitive Desinfectie van gevoelige oppervlakken	■		■	■	■	■	■	■	■	■	■	100% / 1 ³		Medisch hulpmiddel
FD 366 sensitive wipes	■		■	■	■	■	■	■	■	■	■	gebruiksklaar / 1 ³		Medisch hulpmiddel
FD 366 sensitive top wipes	■		■	■	■	■	■	■	■	■	■	gebruiksklaar / 1 ³		Medisch hulpmiddel
Desinfectie van gevoelige oppervlakken														

HD handenhygiëne

HD 420 plus Handendesinfectie ^{1,2}	■		■	■	■	■	■	■	■	■	■	100% / 0,5 / 1,5 ²		Biocide
HD 435 Waslotion	■											100%		Cosmeticaproduct

ID instrumentenhygiëne

ID 212 Instrumentendesinfectie	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	2% / 5 ³	7	Medisch hulpmiddel
ID 212 forte plus Instrumentendesinfectie	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	2% / 5 ³	7	Medisch hulpmiddel
ID 213 Instrumentendesinfectie	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	2% / 5 ³	14	Medisch hulpmiddel
ID 215 Enzymatisch reinigingsmiddel voor instrumenten	■											1% / 2% / 30 / 15		Medisch hulpmiddel
ID 220 Borendesinfectie	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	100% / 1 ³	7	Medisch hulpmiddel

* VAH-registratie minstens van de druppeloplossing van het preparaat

¹ Desinfectiemiddel voorzichtig gebruiken. Lees altijd het etiket en de productinformatie vóór gebruik (registratienummer HD 420 plus: EU-0032838-0001 1-1, registratiehouder: orochemie GmbH + Co. KG, Max-Planck-Straße 27, 70806 Kornwestheim, Duitsland). ² Hygiënische handendesinfectie bij zichtbaar schone handen: bactericide, levurocide, mycobactericide / tuberculocide, omhulde virussen 30 seconden; beperkt virucide PLUS 90 seconden; chirurgische handendesinfectie: bactericide, levurocide 90 seconden ³ Bactericide/levurocide. Gedetailleerde informatie verneemt u in de productinformatie op internet www.duerdental.com

Houd er rekening mee dat de productbeschikbaarheid en goedkeuringen per land verschillend kunnen zijn.

DÜRR DENTAL SE
Höfigheimer Strasse 17
74321 Bietigheim-Bissingen
Germany
duerrdental.com
info@duerrdental.com

 **DÜRR
DENTAL**
THE BEST, BY DESIGN